


排尿方法

排尿口のレバーを下まで下げると排尿できます。排尿後はレバーを上まで戻してください。

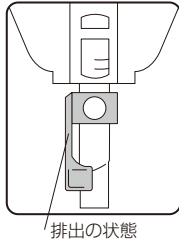

洗浄方法

毎日水洗いし、直射日光や強い熱をさけ、陰干しにて乾燥してください。

規格

商品コードNo.	容量	内容物
15371	500mL	レッグバッグ 5枚 コネクターチューブ 2本 ベルト 2本

for Best Care **ALCARE**

ユーケア[®]レッグバッグ Youcare Legbag

ウリナリーパウチ用レッグバッグ
Legbag for Urinary Pouch

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

■お客様相談室 ☎ 0120-770175

www.alcare.co.jp

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸 1-2-1 アルカセントラル 19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800 (代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

はじめに…

〈ユーケアーレッグバッグ〉は、ウリナリーパウチ用のレッグバッグです。安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせずこの取扱説明書に従いで使用ください。

使用上のご注意


- 〈ユーケアーレッグバッグ〉には容量の目盛りが表示されていますが、あくまでも目安です。正確な量を測定する際には、〈ユーケアーレッグバッグ〉の目盛りは使用せず、別途計量器を使用してください。
- ご使用の際は、下部の排尿口が閉じていることを確認してください。排尿口が閉じていないと尿モレが起きます。
- ベルトはきつく締めすぎないでください（うっ血を起こさない程度）。
- コネクターチューブの長さを調整する場合は座った状態で行ってください。立った状態で長さを調整すると座った際に短くなり、チューブはずれ等による尿モレの原因となります。
- 付属のコネクターチューブは当社のウリナリーパウチ専用です。当社以外のウリナリーパウチには接続できません。無理に接続した場合、尿モレの原因となります。
- ウリナリーパウチの接続は、パウチ内の尿がモレないようあらかじめ排尿し、空にしておくか排尿口を上に向け行ってください。

保管上のご注意



- 室温で保管し、高温多湿や直射日光が当たる場所は避けてください。品質劣化の原因となります。

装着方法

- ①ベルトの緑色の面が表になるようにレッグバッグに通します。
(ベルトの裏地がゴム状で、ずり落ちを防止します。レッグバッグ上下の管が押さえられ、密着されます。)

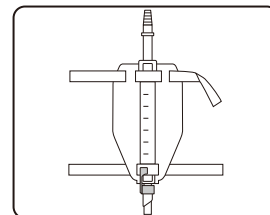


- ②下部の排尿口が閉じていることを確認し、レッグバッグの不織布面と肌が接するように、ベルトの面ファスナーで装着します。

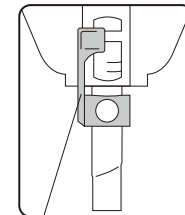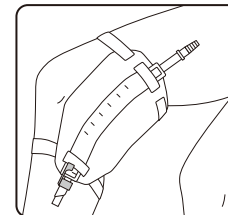


閉じている状態

- ③座った状態で、ウリナリーパウチと接続するコネクターチューブの長さをハサミを用いて調整します。

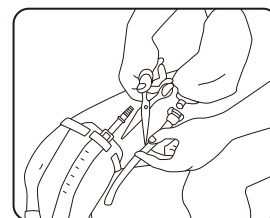

- ④レッグバッグの上部にコネクターチューブを接続します。
なるべく奥まで差し込んでください。

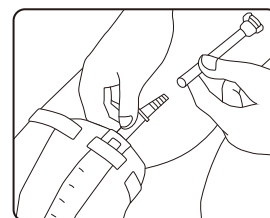

- ⑤ウリナリーパウチの排尿口を上に向けた状態で、コネクターチューブのコネクター部を排尿口へ“カチッ”と音がするまで強く押し込みます。

